

Nerivio®

by theranica


exklusiv bei
beta pharm

So verwenden Sie Nerivio®


- 1 Laden Sie die Nerivio®-App herunter und installieren Sie diese auf Ihrem Smartphone.
(Technische Anforderungen auf www.nerivio.de)




- 2 Verbinden Sie das Gerät mit der App.

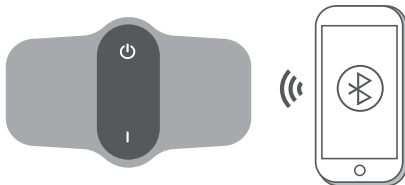


- 3** Bringen Sie das Gerät auf der Außenseite Ihres Oberarms an.

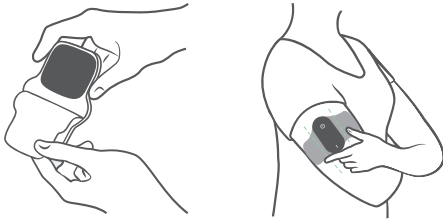

- 4** Passen Sie das Armband an Ihren Oberarm an und binden Sie es um das Gerät.

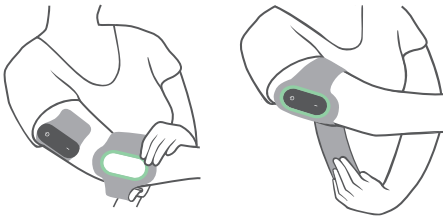

Ist der Armgurt zu kurz, verwenden Sie die Gurtverlängerung.

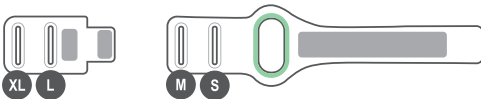

- 5** Beginnen Sie die Behandlung innerhalb der ersten 60 Minuten nach Auftreten des Migränekopfschmerzes und/oder der Aura. Zur prophylaktischen Behandlung wenden Sie Nerivio jeden zweiten Tag an.

Stellen Sie die Intensität der Impulse so ein, dass diese sich stark, aber noch angenehm und nicht schmerzhaft anfühlen.

