

# Nerivio<sup>®</sup>

by theranica

**NEU**



## Power ON bei Migräne

Ohne  
Medikamente

Informationen  
für Patienten

exklusiv bei  
**beta pharm**

# Ihre neue Freiheit in der Migränetherapie

- Wirkt ohne Medikamente
- Bei akuten Attacken und zur Vorbeugung geeignet
- Sehr gute Wirkung<sup>1,2</sup> und Verträglichkeit<sup>1,3,4</sup> in klinischen Studien bewiesen
- Unauffällige Anwendung am Oberarm



Individuell steuerbar mit der Nerivio®-App auf Ihrem Smartphone

**Nerivio® – das Armband mit der Aktivierung der natürlichen Schmerzhemmung**


1 Yarnitsky D et al. Remote Electrical Neuromodulation (REN) Relieves Acute Migraine: A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled, Multicenter Trial. *Headache* 2019;59(8):1240–1252  
2 Tepper SJ et al. Remote electrical neuromodulation for migraine prevention: A double-blind, randomized, placebo-controlled clinical trial. *Headache* 2023;63(3):377–389  
3 Tepper SJ et al. Real-world Experience with Remote Electrical Neuromodulation in the Acute Treatment of Migraine. *Pain Medicine* 2020;21(12):3522–3529  
4 Ailani J et al. Real-World Analysis of Remote Electrical Neuromodulation (REN) for the Acute Treatment of Migraine. *Front Pain Res* 2022;2:753736

# Nerivio® einsetzen, wenn Sie es brauchen

Sie leiden unter Migräne? Sobald sich die Attacke ankündigt, legen Sie Nerivio® an Ihrem Oberarm an.

Lassen Sie die schmerzfreien Impulse von Nerivio® 45 Minuten lang wirken. Schauen Sie sich das Therapievideo in der Nerivio®-App auf Ihrem Smartphone an. Es unterstützt die Behandlung und hilft zu entspannen.

In klinischen Studien sind ein Drittel der Anwender zwei Stunden nach der Behandlung schmerzfrei. Bei zwei Dritteln wird der Schmerz deutlich geringer<sup>1</sup>:

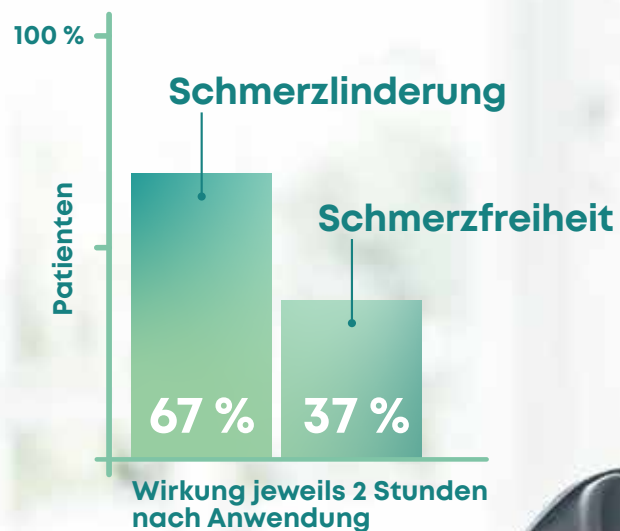

Eine Migräneattacke kommt nie zur richtigen Zeit: wegen eines Geschäftstermins, weil der Nachwuchs ins Training muss, die Urlaubsreise ansteht oder am Abend der Konzertbesuch ist. Dann ist Hilfe gefragt!

<sup>1</sup> Yarnitsky D et al. Remote Electrical Neuromodulation (REN) Relieves Acute Migraine: A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled, Multicenter Trial. Headache 2019;59(8):1240–1252



# Nerivio® – es geht um Ihre Lebensqualität

Sie leiden sehr häufig unter Migräne? Dann bietet sich Nerivio® auch zur Vorbeugung von Attacken an.

Lassen Sie Nerivio® jeden zweiten Tag 45 Minuten lang vorbeugend wirken – auch ohne akute Attacke. Das trainiert Ihren natürlichen Mechanismus der Schmerzlinderung.

Bei jedem zweiten Anwender halbiert sich die Schmerzintensität. Und im Durchschnitt hat jeder Nutzer ganze vier Migränetage weniger.<sup>1</sup> Menschen mit häufigen Migräneattacken wissen, wie viel mehr an Lebensqualität das bedeutet!

## Schmerzfreiheit



4 Migränetage weniger pro Monat<sup>1</sup>

## Schmerzlinderung



Mehr als 50% Schmerzreduktion an Tagen mit mittleren bis schweren Kopfschmerzen<sup>1</sup>



Eine wirksame Migränetherapie ist mehr als Linderung von Schmerz, Übelkeit oder Lichtempfindlichkeit. Schätzungsweise eine Million Menschen in Deutschland haben an mindestens 15 Tagen im Monat Migräne. Für diese Betroffenen werden Schule, Studium oder Arbeit zur Tortur. Die Liebsten leiden mit und das soziale Miteinander wird schwer belastet. Nerivio® als vorbeugende Therapie kann auch in diesen Fällen helfen.

<sup>1</sup> Tepper SJ et al. Remote electrical neuromodulation for migraine prevention: A double-blind, randomized, placebo-controlled clinical trial. Headache 2023;63(3):377–389

# VORBEUGUNG

exklusiv bei  
**beta pharm**

### Unterwegs mit Nerivio®

Nerivio® ist handlich und passt in praktisch jede Tasche. Die Anwendung am Oberarm ist unkompliziert und auch unter der Kleidung möglich.

Nerivio®  
ist bereits ab  
12 Jahren  
zugelassen.

## Nerivio® – Ihre individuelle Therapie ohne Arzneimittel

Das große Plus von Nerivio®: Es gibt Ihnen mehr Freiheit in Ihrer ganz persönlichen Migränetherapie. Nerivio® kann Migränemedikamente überflüssig machen. Mit Nerivio® entscheiden Sie selbst über die Stärke des Impulses. Und Nerivio® ist so handlich, dass Sie es überallhin mitnehmen und bei Bedarf selbst schnell und unauffällig anwenden können. Ob bei der Arbeit, in der Schule, an der Uni oder in der Freizeit sowie auf Reisen.

### Fragen Sie nach Nerivio®, wenn

- Sie eine neue Therapie testen wollen
- Sie keine Medikamente nehmen möchten oder bestimmte Migränemittel nicht nehmen dürfen
- Arzneimittel bei Ihnen Nebenwirkungen wie Allergien erzeugen
- die gängigen Medikamente nicht (mehr) wirken
- die erstmalige Behandlung der Migräne, z. B. im Teenager-Alter, ohne Arzneimittel stattfinden soll

# Mit Nerivio® am Arm haben Sie Ihre individuelle Therapie in der Hand

## Power ON

Das Nerivio®-Armband ist schnell an Ihrem Oberarm angebracht. Nur ein Knopfdruck – und schon ist das Armband mit der Nerivio®-App auf Ihrem Smartphone verbunden.



## Angenehm

Mit dem Regler auf der Nerivio®-App bestimmen Sie die Intensität der Impulse selbst.

## App-Funktionen

Ein Therapievideo leitet Sie durch die Anwendung, und kann das Behandlungsergebnis verbessern<sup>1</sup>. Die App generiert automatisch ein persönliches Migränetagebuch, das Sie per E-Mail Ihrem Arzt oder Ihrer Ärztin schicken können. Mit zahlreichen Statistikfunktionen messen Sie Ihren Behandlungserfolg.

# Impuls am Arm – Wirkung im Schmerzzentrum

Nerivio® ist eine medizinische Innovation mit dem neuartigen Wirkprinzip REN (Remote Electrical Neuromodulation).

Die schmerzfremde Stimulation findet am Oberarm statt, die Wirkung aber entfaltet Nerivio® im Schmerzzentrum des Hirnstamms. Dort stimulieren die Impulse einen natürlichen Prozess, der „Absteigende Schmerzregulation“ heißt. Dabei schüttet das Gehirn unter anderem die schmerzlindernden Botenstoffe Serotonin und Noradrenalin aus. Der Migräneschmerz nimmt ab.



## Remote Electrical Neuromodulation

# REN

Das Wirkprinzip REN ist in den USA seit 2019 von den Gesundheitsbehörden zugelassen. Inzwischen wurden dort mehr als 700.000 Anwendungen durchgeführt.

<sup>1</sup> Buse DC et al. Combining Guided Intervention of Education and Relaxation (GIER) with Remote Electrical Neuromodulation (REN) in the Acute Treatment of Migraine. Pain Med 2022;23(9):1544–1549



# Fragen Sie nach Nerivio®

Nerivio® ist ein verschreibungspflichtiges Medizinprodukt. Fragen Sie ihren Arzt oder Ihre Ärztin, wie sich Nerivio® in Ihre Migränetherapie integrieren lässt.

1

## Rezept holen

Fragen Sie nach einem Rezept.



2

## Online einlösen

Lösen Sie das Rezept auf [www.nerivio.de](http://www.nerivio.de) ein und bestellen Sie Nerivio® nach Hause.



3

## Anwenden

Laden Sie die Nerivio®-App auf Ihr Smartphone und wenden Sie das Gerät an.



### TIPP

Ein Gerät reicht für 18 Anwendungen. Fragen Sie gleich nach einer Mehrfachverschreibung

### TESTANGEBOT

Ihr erstes Nerivio®-Gerät erhalten Sie zu einem vergünstigten Testpreis. Alle Angebote auf: [www.nerivio.de](http://www.nerivio.de)



# [www.nerivio.de](http://www.nerivio.de)

Nerivio® ist ein Neuromodulations-Gerät für die akute und/oder vorbeugende Behandlung von Migräne mit oder ohne Aura bei Patienten ab 12 Jahren. Nerivio® kann nur mit Vorlage einer ärztlichen Verordnung erworben werden. Konsultieren Sie bei Fragen Ihren Arzt. Weitere Informationen zu Indikationen und Kontraindikationen sowie Anwendungshinweise finden Sie auch unter [www.nerivio.de](http://www.nerivio.de)  
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung der Sprachformen männlich, weiblich und divers verzichtet.